

Zentrum für Pathologie Essen Mitte, Fachärztliche BAG

FB-PA 02

Einsenderinformation

Version: 2 / 19.02.2024

Gefäße:

Bitte unsere Gefäßaufkleber, oder Krankenhaus Pat.-Aufkleber benutzen und beschriften mit:

- Name:
- Geburtsdatum:
- Lokalisation der Entnahme, bei mehreren Gefäßen von einem Pat. bitte Gefäße nummerieren. Die Nummerierung muss mit den Lokalisationsangaben auf dem Schein übereinstimmen.

Gefäße wählen, die groß genug sind (Formalin/Gewebeverhältnis ca. 5:1) und einen weiten Hals haben, da sich das Gewebe nach der Fixierung ausdehnt und wir es sonst nicht herausbekommen.

Bitte darauf achten, dass das Gewebe in der Flüssigkeit flottiert und nicht trocken am Rand klebt, oder im Schraubdeckel eingequetscht wird.

Alle Gefäße fest zuschrauben, sodass diese beim Transport nicht auslaufen können.

Begutachtungsanträge:

Bitte **vollständig** die Pat.-Angaben im gelben Bereich oben links ausfüllen (maschinelle oder Klinik-Aufkleber bevorzugt), für Arztpraxen (Überweisungsschein; Rezept bei Zahnärzten) unbedingt erforderlich

Diagnostische Angaben:

- Lokalisationsangabe
- Art des Untersuchungsmaterials
- Fragestellung, klinische Angaben
- ggfs. Faden-/Clip-Markierung, Skizze beachten
- Stempel, Unterschrift, Telefonnr. des Arztes

Wichtig: Korrekte Anzahl der Gefäße unten re., Übereinstimmung beachten, sonst telef. Rücksprache unsererseits nötig!

Infektiöses Material bitte immer besonders kennzeichnen

Eileinbettung : Telefonische Befunddurchsage am nächsten Werktag ab 10 Uhr möglich.

Schnelleinbettung am gleichen Tag: Anlieferung Mammastanzen bis 9 Uhr, Biopsien bis 10 Uhr

Mammagewebe:

Um eine genaue Hormonrezeptorenbestimmung und in situ Hybridisierung durchführen zu können, ist es unbedingt notwendig, dass die Mammastanzen mind. 6 h und Mammaresektate mind. 24 h in Formalin fixieren. Sonst können falsch negative Ergebnisse erzielt werden.

Deshalb bitte auch die Formalinzeit (ab wann das Gewebe eingelegt wurde) mit auf den Begutachtungsantrag angeben.

Schnellschnitt:

Angabe der Rückrufnummer

Material nur nativ ohne Formalin, ohne NaCl-Lsg. versenden, bei längerem Transport auf Eisbeutel legen

Schnellschnitte nach 14 Uhr telefonisch amelden (0201/4379410)

Umgang mit Formalin:

Formalin ist ein Gefahrenstoff!

s. beiliegendes Sicherheitsdatenblatt

Schilddrüsenzytologien:

Gefäße **ausschließlich** mit dem Patientenaufkleber des ZPEM versehen. 5-7,5 ml Cytospin Collection Fluid einfüllen (Markierung auf dem Probengefäß). Probengefäße bitte gut zudrehen! Einsendeschein für Schilddrüsenzytologien benutzen. Auf die blaue Versandtüte bitte den Absender stempeln.